

## Rychlé a spolehlivé určování krevních skupin na krevních destičkách díky nové patentované technologii M-TRAP®.

Technologie M-TRAP® je založena na imobilizaci protilátek vázaných v porézní membráně. V membráně se zachytí pouze červené krvinky s odpovídajícím antigenem, což se vizuálně projeví při hodnocení krevní skupiny.

Technologie M-TRAP® patentovaná společností DIAGAST má 2 hlavní výhody:

- Protože jsou testované protilátky navázány uvnitř horní membrány, nikdy se nedostanou do přímého kontaktu s uživatelem. Neexistuje žádné riziko křížové kontaminace.
- Protože spodní membrána absorbuje kapaliny testu (PAD pufr a vzorek krve), riziko expozice krve je podstatně nižší.


Tento jednoduchý protokol probíhá ve 3 krocích a trvá **pouze 30 sekund**.



Aktivace: hydratace membrány 1 kapkou pufru



Přidání krve do jamek

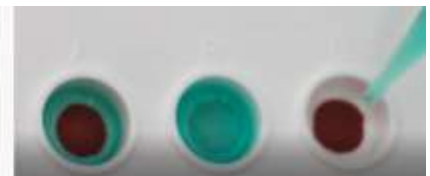

Zobrazení výsledku: naplnění jamek puftrem

### Široké pole použití:




U postele pacienta: kontrola shody mezi pacientem a krevním vakem



Kontrola krevní skupiny dárců / krevních vaků



Použití v terénu: sanitky / tábory / armáda

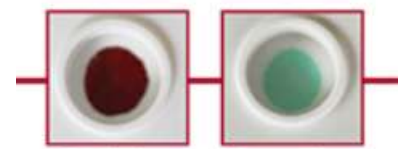

Pozitivní x negativní reakce



Distributor:

INTES BOHEMIA s.r.o.

Vodičkova 41 č.p. 791, 112 09 Praha 1



Výrobce:

DIAGAST Headquarters 251, avenue Eugène Avinée  
59120 LOOS – FRANCE